

Prüfanleitung

Überprüfung der Reinigung von Instrumenten nach der Aufbereitung

Vorbemerkung

Diese Anleitung dient als Hilfestellung bei der Prüfung der Reinigungsleistung im Rahmen der Aufbereitung von Medizinprodukten. Diese Prüfanleitung kann sowohl bei manuellen als auch bei maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsprozessen zur Anwendung kommen.

Bei der Prüflösung handelt es sich um eine SDS-Lösung, mit einer hohen Materialverträglichkeit. Eine Schädigung der zu untersuchenden Medizinprodukte ist dennoch nicht gänzlich auszuschließen. Im Zweifelsfall ist der Hersteller des Medizinproduktes zu befragen.

Achtung: Vor der Durchführung bitte per E-Mail an materialbestellung-Hybeta@normecgroup.com ein Begleitschein pro Instrument anfordern.

Durchführung der Prüfung, vor der Desinfektion

1. Das Medizinprodukt darf bei der Aufbereitung und bei der Verpackung nur mit Handschuhen berührt werden. Es sind daher grundsätzlich neue Einweghandschuhe zu tragen und alle Kontaktflächen (Tisch oder sonstige Unterlagen) müssen sauber und desinfiziert sein.
2. Das zu untersuchende Medizinprodukt wird unter der Beachtung der jeweiligen Standardarbeitsanweisung maschinell oder manuell gereinigt.

Der maschinelle Aufbereitungsprozess muss direkt nach der Reinigungsphase unterbrochen werden! Es ist mit dem RDG-Hersteller zu klären, wie der maschinelle Aufbereitungsprozess unterbrochen werden kann.

Instrumente, die nach dem Desinfektionsschritt entnommen werden, sind nicht auswertbar.

Der abgebrochene Reinigungs- und Desinfektionsprozess muss erneut von Beginn an gestartet werden!

3. Jedes Instrument muss einzeln in einen Folienbeutel verpackt und sicher verschlossen werden, damit es auf dem Transportweg nicht zu einer Kontamination der Umgebung kommen kann. Die Begleitscheine dürfen **nicht** mit in die Einzelverpackung gegeben werden!
4. Um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten, ist der Begleitschein komplett auszufüllen und der Transportverpackung beizulegen.
5. Nach erfolgter Untersuchung erhalten Sie das Medizinprodukt und den Prüfbericht zurück.
6. Die zurückgesendeten Medizinprodukte müssen vor dem Wiedereinsatz aufbereitet werden.

Probenlagerung und Transport

- Im Begleitschein sind das Medizinprodukt und ggf. der Messpunkt eindeutig zu benennen.
- Begleitschein bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen.
- Die Medizinprodukte können per Fahrdienst / bzw. Postweg an unser Labor zurückgesendet werden

Rücksendeadresse

Normec Hybeta GmbH
Nevinghoff 20
48147 Münster

Der Transport und die Probenahme sind nicht Teil der akkreditierten Leistung.